


Rystora®

IN HARMONY WITH YOUR SKIN



Spray Protector de piel (No estéril)

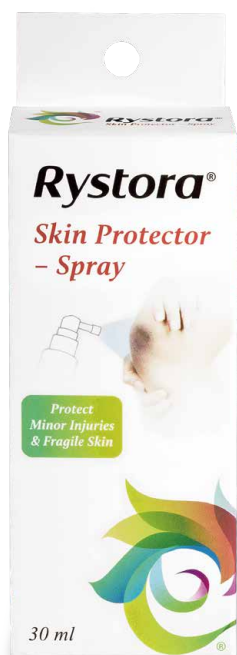

PROTEGER LAS LESIONES
MENORES Y PIELES FRÁGILES



Spray Protector de piel Rystora® puede crear rápidamente una película protectora transparente, transpirable, impermeable, de secado rápido y no pegajosa en la superficie de la piel. La película crea una barrera transpirable e impermeable para los cortes menores, abrasiones, la piel agrietada o relacionada con los esparadrapos adhesivos médicos, previene la fricción o el contacto con irritante para la piel.


Sus buenas características incluyen:

- Proteger las lesiones menores y pieles sensibles
- Provenir las lesiones cutáneas relacionadas con los esparadrapos adhesivos médicos
- No irritantes y sin alcohol
- Inodoro e insípido
- Se seca rápidamente en 5 segundos
- No se pega con la ropa después de secarse
- Impermeable y transpirable
- Biocompatible


ESPECIFICACIONES

REF. No.	Descripción
SY01030	Botella de Spray 30ml (No estéril)

INDICACIONES DE USO

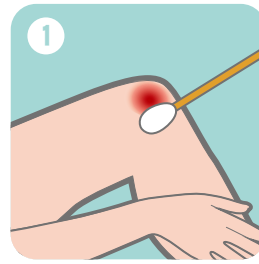

1. Limpie y seque completamente la zona de piel para la película del Spray Protector.

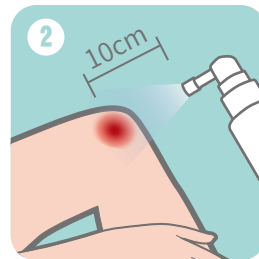

2. Mueva la botella bien antes de utilizar. Pulse el atomizador desde 10-15 centímetros (4-6 pies) de distancia a la piel.



3. Espere sobre 5 segundos para que se seque la primera película antes de aplicar la segunda. Repita el paso 2 hasta que tenga 3 capas.



4. Se recomienda de aplicar 3 capas de Spray sobre la piel lesionada cada 4 horas.

Rystora®

Fortune Medical Instrument Corp.

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd., Danshuei Dist, New Taipei City 251, Taiwan

Manufactured by: No. 256, Changchun 2nd, Rd., Jhongli Dist, Taoyuan City 320, Taiwan

T. +886 2 2624-2233 www.rystora.com

Rystora® es una marca registrada de Fortune Medical.

EDM SPRAY Esp. V20210924