

# **Rystora**<sup>®</sup>

IN HARMONY WITH YOUR SKIN



## ***La Cinta de Silicona para Cicatrices (No estéril)***



ATENUA Y DESTENIR LAS  
CICATRICES Y PREVIENE LA  
FORMACIÓN DE LA CICATRICES

---

## La Cinta de Silicona para Cicatrices

**Rystora®** se usa para atenuar y desteñir las cicatrices recientes y antiguas, y ayuda a prevenir la formación como las cicatrices hipertróficas y queloides. La cinta es no pegajoso, no genera adhesivo residual, que se puede reposionar sin dañar la capa frágil de la piel o causar dolores indebidos a los pacientes. La línea de corte está diseñada para rasgarse cuidadosamente a mano a la longitud que necesita. El rendimiento adhesivo es bueno, impermeable y transpirable.



Líneas precortadas



Apto para la piel en articulaciones



Impermeable



Transpirable y hidratante

- Hecho de gel de silicona en una capa de poliuretano.
- Tiras precortadas, fácil de aplicar y retirar.
- Se puede cortar manualmente manteniendo la tensión apropiada de la cinta.
- Fina y flexible, es indolora al retirar y no daña la piel.
- Buena adherencia, resistente al agua y sin deformación en las extremidades de la cinta.
- Es de un solo uso para asegurar su higiene.

## INDICACIONES DE USO

1. Asegúrese de que la piel está limpia, seca y libre de pomadas o cremas antes de aplicar la cinta.
2. Elija un largo apropiado de la Cinta de Silicona para Cicatrices Rystora® cortando por la línea precortada y asegúrese de que la cinta cubra completamente el área afectada.
3. Apriete suavemente la Cinta de Silicona para Cicatrices Rystora® para que se pegue a la piel firmemente.

## ESPECIFICACIONES

REF. No.	Descripción
SAR251500	25mm x 1.5m No estéril Desechable

# Rystora®

## Fortune Medical Instrument Corp.

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd., Danshuei Dist, New Taipei City 251, Taiwan

Manufactured by: No. 256, Changchun 2nd, Rd., Jhongli Dist, Taoyuan City 320, Taiwan

T. +886 2 2624-2233 [www.rystora.com](http://www.rystora.com)

Rystora® es una marca registrada de Fortune Medical.

EDM TAPE Esp. V20210917